

TRANSFERT ASSIS DEBOUT ASSIS

MD

LPPR :
627 19 58
627 19 64

RÉFÉRENCE :

SIVERSO

Il permet à un aidant de déplacer en toute sécurité une personne d'une assise à une autre éloignée, en passant par la position debout !

VERSO® est un guidon de transfert déplaçant qui se compose d'un monobras englobant réglable en hauteur, d'appuis tibiaux inclinables et d'une base solide freinable.

Grâce à son design étudié pour reproduire le mouvement naturel du lever (schéma moteur naturel), il améliore la verticalisation, sollicitant ainsi les capacités de la personne lors du passage en position debout.

Sa large base freinable assure une stabilité optimale lors du lever, rassurant la personne, et facilite le déplacement, préservant ainsi l'aidant d'un effort. Équipé de roulettes, **VERSO®** permet de limiter les transferts, en allant aisément de la chambre à la salle de bain sans étape intermédiaire. L'entraxe des roues est optimisée pour s'insérer sous n'importe quel fauteuil roulant.



+ ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

Le cadre englobant et incliné du **VERSO®** assure une grande stabilité et améliore la verticalisation de l'aidé, participant à la rééducation lors de chaque transfert.

LES SANGLES DISPONIBLES



Sangle **SANGO®**
Réf : **SANGO**

Fournie avec la réf. :
SIVERSO



Sangle **TCALEO®**
Réf : **SYSTCALEO**

Option pour un transfert sécurisé et un maintien en position debout



Système **ISSEO®**
Réf : **SYSSEO**

Option pour un transfert sécurisé et graduel



CE
GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCE USURE



Garantie* : 2 ans hors pièces d'usure (6 mois)
 Fabricant : Alter Eco Santé
 Origine : France (Auvergne Rhône Alpes)
 Classe du dispositif médical : Classe 1




LPPR :
 627 19 58
 627 19 64

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

Fiche Technique

VERSO®

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
 GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT

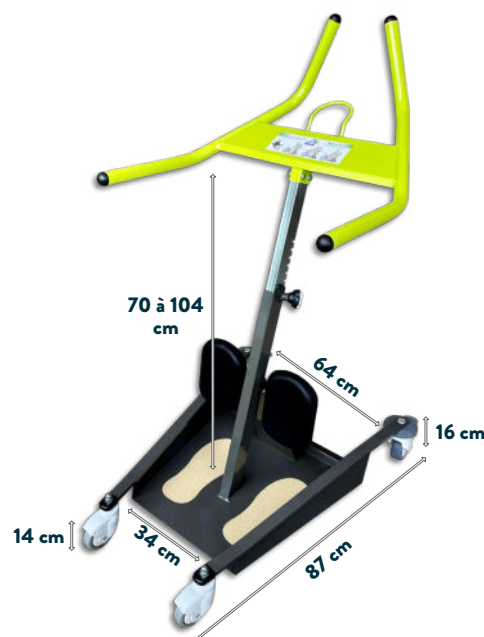

Aire de rotation : 96 cm

Cette fiche technique présente un résumé des caractéristiques techniques principales (dimensions, références, pièces d'usure, entretien). Elle ne contient pas toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre du dispositif. Veuillez consulter la notice d'utilisation complète pour les instructions détaillées, les avertissements et précautions de sécurité notamment.

RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	CHARGE MAX. ADMISSIBLE
SIVERSO	03760311370199	Guidon de transfert déplaçant VERSO®	19 kg	150 kg

PIÈCES D'USURE

Mousses appuis tibiaux standards et appuis brachiaux (ref : Z90MT), roulettes freinées (ref : ZRFREINVERSO), roulettes non freinées (ref : ZRNFVERSO).

Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.

HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température.

Il est recommandé de procéder au nettoyage après chaque utilisation ou entre 2 patients.

COMPOSITION & COULEUR

Acier, nylon, PE, PVC, mousse polyuréthane.
 Couleur : Vert anis.



Notice de montage