

## APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT

Version : A-2025  
Date de Mise à Jour : 01/10/2025

### TRANSFERT ASSIS DEBOUT ASSIS

**MD**

**LPPR :**  
627 19 58  
627 19 64


#### RÉFÉRENCE :

SINA

**Il permet à un aidant de transférer un patient, par pivot, entre deux assises proches en passant par la position debout !**

**TINA®** est un guidon de transfert pivotant qui se compose d'un monobras englobant réglable en hauteur, d'appuis tibiaux inclinables sur une base solidaire de 48 cm de diamètre.

Grâce à son design étudié pour reproduire le mouvement naturel du lever (schéma moteur naturel), il permet à la personne de se mettre debout en sollicitant ses capacités. Sa large base assure une stabilité optimale lors du lever, rassurant la personne, et facilite le pivot, préservant l'aidant d'un effort.

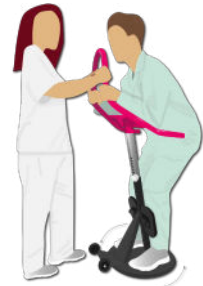

Il s'adresse à des personnes ayant besoin de passer **d'une assise proche à une autre**, ayant des **capacités dans au moins un des deux membres inférieurs sans avoir la capacité de piétinement.**

#### + ENTRETIEN DE L'AUTONOMIE

Le cadre englobant et incliné du TINA® assure une grande stabilité et améliore la verticalisation de l'aidé, participant à la rééducation lors de chaque transfert.

#### 📌 SANGLE DORSO LOMBAIRE



Sangle SANGO®  
Réf : SANGO

Fournie avec la réf. : SINA

#### ÉTUDE CLINIQUE COMPARATIVE 100% DE RÉUSSITE DE VERTICALISATION

Pour le guidon TINA®  
82,2 % pour 2 guidons concurrents.  
Etude complète sur demande.

**CE**  
GARANTIE 2 ANS  
HORS PIÈCE USURE





Garantie\* : 2 ans hors pièces d'usure (6 mois)  
 Fabricant : Alter Eco Santé  
 Origine : France (Auvergne Rhône Alpes)  
 Classe du dispositif médical : Classe 1



LPPR:  
 627 19 58  
 627 19 64

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

# Fiche Technique

## TINA®

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION  
 GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT



Cette fiche technique présente un résumé des caractéristiques techniques principales (dimensions, références, pièces d'usure, entretien). Elle ne contient pas toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre du dispositif. Veuillez consulter la notice d'utilisation complète pour les instructions détaillées, les avertissements et précautions de sécurité notamment.



RÉFÉRENCE	N° IDENTIFICATION UDI	DESCRIPTION	POIDS	CHARGE MAX. ADMISSIBLE
SINA	03760311370038	Guidon de transfert pivotant TINA®	16 kg	150 kg

### PIÈCES D'USURE

Mousse appuis tibiaux (ref : Z90MT), roulettes (ref : ZDA38-010-75).

**Seules les pièces d'origines fournies par le fabricant assurent la conformité du produit, le niveau de service et la sécurité exigés par le concepteur.**

### HYGIÈNE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

**LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.**

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.

**Produits prohibés :** Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.

**Produit recommandé :** Détergent désinfectant surfaces hautes.

Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Compatible protocoles de bionettoyage et désinfection vapeur selon la norme NF T72-110 pour la désinfection à la vapeur (utilisation D-VAP PRISM).

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température.

Il est recommandé de procéder au nettoyage après chaque utilisation ou entre 2 patients.

### COMPOSITION & COULEUR

Acier S235, Acier galvanisé, nylon, PE, PA66 (galets), mousse polyuréthane.  
 Couleur : Rose fuchsia.



Notice de montage