

MAINTIEN
CONTENTION

NAUSICAA
MEDICAL



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
Protections de barrières de lit

Descriptif

Les protections en mousse s'installent facilement sur les barrières de lit, empêchant le patient de se cogner ou de passer ses membres entre les barreaux, tout en le protégeant du contact direct avec le métal. Grâce à leur nouvelle forme ergonomique, elles tiennent seules en place, le temps d'atteindre les boucles rapides de fixation de 25 mm, ce qui facilite leur installation.

La housse amovible, en Protectlaise classée M1, répond aux normes de sécurité incendie.

Disponible en taille M (140 cm de longueur) et L (180 cm de longueur).



PROBAR2-PF

v 02.08/25

Préconisation



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Ces protections en mousse s'installent sur les barrières de lit. Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal. Housse classée M1 et mousse déhoussable. Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.

Composition

- Composition complète : 77% PVC 23% PES
- Sangle polyester et boucle nylon

Mise en place

Ce dispositif médical est destiné à la sécurité du patient.

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

- Placer les protections à l'intérieur de la barrière, fermeture à glissière en bas contre le matelas.
- Fermer les sangles, en les ajustant "tendues" autour des tubes des barrières.
- Contrôler si les protections sont bien ajustées aux barrières, sans possibilité de tourner autour.

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du lit
 - d'ajuster au mieux le produit sur le lit

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Nettoyage par surfacage avec une chiffonnette à l'eau tiède savonneuse.
- Désinfection par surfacage avec tous produits utilisés en milieu hospitalier.

Lavage des housses seules :

- Ne jamais laver les housses avec la mousse (voir recto).