

**DONJOY®**

RESTEZ ACTIF  
DANS VOTRE  
QUOTIDIEN !

**GAMME DE CONTENTION ÉLASTIQUE**



**enovis**

*Creating Better Together™*



**DONJOY®**

# UN ALLIÉ COMPRESSIF POUR PRATIQUER SON ACTIVITÉ AU QUOTIDIEN.

Parfois, rester actif requiert un soutien additionnel. Les supports de contention élastique de la gamme DonJoy® offrent protection et stabilité aux articulations sans entraver les activités quotidiennes.

Fabriquée dans un tissu respirant et dotée de nombreux dispositifs de réglage, la gamme de contention élastique offre un soutien tout en s'adaptant aux défis de la vie.



## CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

### UN AJUSTEMENT OPTIMAL




#### **ZONES EXTENSIBLES**

Favorisant le confort et la liberté de mouvement. Elles permettent au patient d'appliquer et de retirer l'attelle. Les zones de confort assurent un ajustement sans plis.



#### **COMPRESSION GRADUELLE AVEC ZONES DE DECOMPRESSION**

Permet de réduire la pression aux extrémités pour assurer un ajustement confortable.

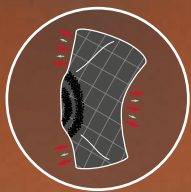

#### **MAILLAGE TEXTILE RESPIRANT, ÉLASTIQUE ET DOUX**

Pour un confort accru.



#### **TRICOTAGE ANATOMIQUE 3D**

Assure une adaptation optimale à la morphologie.

### UN CONFORT AMÉLIORÉ



#### **INSERTS EN SILICONE**

De forme anatomique et dotés de picots, ils sont conçus pour améliorer la proprioception, favoriser le soutien compressif autour de l'articulation mais également pour aider à masser, soulager la douleur et réduire l'œdème.



#### **BANDES ANTI-GLISSEMENT**

Présentes sur les genouillères, elles permettent de maintenir le dispositif en place lors des activités.



#### **LARGE CHOIX DE TAILLES**

Pour répondre à la majorité des morphologies.





# GenuForce®

## Genouillère tricotée élastique avec insert rotulien

La genouillère GenuForce® aide à protéger et à soutenir la rotule tandis que ses renforts bilatéraux flexibles contribuent à soulager et à stabiliser l'articulation du genou.

### INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique et arthrose légère du genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Douleur fémoro-patellaire (douleur antérieure du genou)
- Instabilité légère du genou
- Prévention des blessures



#### **INSERT ROTULIEN EN SILICONE**

- Pour une meilleure stabilité de la rotule, un effet de massage et une meilleure proprioception



#### **BALEINES BILATÉRALES SOUPLES**

- Permettent de fournir un soutien médial et latéral





# GenuForce® Xpert

Genouillère articulée tricotée avec insert rotulien en silicone et sangles réglables

Dotée de charnières polycentriques rigides et de sangles réglables, la genouillère profilée GenuForce® Xpert contribue à améliorer le soutien latéral et la stabilité pendant le mouvement lors des activités quotidiennes et/ou sportives.

## INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique du genou et légère arthrose du genou
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses ligamentaires légères à modérées
- Instabilité légère à modérée du genou
- Légères lésions méniscales
- Prévention des blessures



### **SANGLES RÉGLABLES AUTOUR DE LA CUISSE ET DU MOLLET**

- Permettent de fournir une compression et un soutien supplémentaires



### **INSERT ROTULIEN EN SILICONE**

- Pour une meilleure stabilité de la rotule, un effet de massage et pour améliorer la proprioception



### **BALEINAGES RIGIDES BILATÉRALES AVEC ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES**

- Permettent d'offrir une meilleure stabilité médiale et latérale





# MalleoForce®

## Chevillère tricotée élastique avec inserts malléolaires

MalleoForce® intègre des inserts malléolaires bilatéraux dans une construction en tissu élastique multidirectionnel pour soulager et stabiliser l'articulation de la cheville.


### INDICATIONS

- Soutien et compression après lésion aiguë ou chronique de la cheville et légère arthrose de la cheville et du pied
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Prévention des blessures



#### **GRAPHIQUES VISUELS MALLÉOLAIRES**

- Pour aider à assurer une application correcte du support

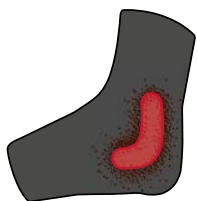

#### **DEUX INSERTS MALLÉOLAIRES ANATOMIQUES EN SILICONE**

- Aident à protéger, à stabiliser et à soulager les malléoles





# MalleoForce® Plus

Chevillère tricotée élastique avec inserts malléolaires et sangle réglable

MalleoForce® Plus utilise des inserts intégrés et une sangle de strapping réglable pour aider à soulager, stabiliser et protéger l'articulation de la cheville contre les mouvements excessifs, ainsi qu'à favoriser l'acuité proprioceptive.

## INDICATIONS

- Soutien et compression après une lésion aiguë ou chronique de la cheville
- Légère arthrose de la cheville et du pied
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses légères (stade I) de la cheville
- Instabilité légère de la cheville
- Prévention des blessures



### GRAPHIQUES VISUELS MALLÉOLAIRES

- Pour aider à assurer une application correcte du support



### DEUX INSERTS ANATOMIQUES DE CHEVILLE EN SILICONE

- Aident à protéger, à stabiliser et à soulager les malléoles



### SANGLE RÉGLABLE

- Peut être adaptée pour aider à prévenir la supination ou la pronation






# ManuForce®

## Attelle de poignet tricotée élastique avec insert styloïde

ManuForce® utilise une sangle réglable et une baleine palmaire amovible pour aider à fournir une compression, un soutien et une stabilisation adaptée pour le poignet.

- Soutien et compression à la suite d'une lésion légère ou d'arthrose légère du poignet
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses légères du poignet
- Tendinite du poignet et ténosynovite légère
- Instabilité du poignet
- Syndrome du canal carpien
- Prévention des blessures

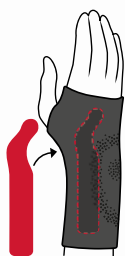

### **BALEINE PALMAIRE AMOVIBLE**

- Permet de fournir une stabilité et un soutien supplémentaires, peut être retirée après la phase aiguë



### **STRAPPING AMOVIBLE ET RÉGLABLE**

- Permet de contrôler le degré de stabilisation et de compression



### **INSERT STYLOÏDE ULNAIRE À CONTOUR ANATOMIQUE**

- En silicone, aide à fournir un soutien et un meilleur confort



# EpiForce®

## Coudière tricotée élastique avec inserts épicondyliens

La structure en tissu élastique multidirectionnel EpiForce® intègre des inserts épicondyliens et une sangle réglable pour assurer la stabilité de l'articulation du coude et aider à soulager la douleur.

### INDICATIONS

- Soutien et compression après une lésion au coude
- Légère arthrose du coude
- Stimulation proprioceptive et neuromusculaire
- Entorses du coude
- Épicondylite médiale ou latérale (ex. : golf elbow, tennis elbow)
- Tendinopathies
- Prévention des blessures



### INSERTS ÉPICONDYLIENS ANATOMIQUES

- En silicone, aident à fournir un confort et une pression ciblés



### STRAPPING AMOVIBLE ET RÉGLABLE


- Permet de contrôler le degré de stabilisation et de compression



# INFORMATION DE COMMANDE

## GENUFORCE®

| DESCRIPTION     | CODE ARTICLE | CODE GTIN     | Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE | Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET | TAILLE   |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| GenuForce®      | 82-1750-1    | 0190446716945 | 37 - 40 cm                | 25 - 28 cm                | 1 = XS   |
|                 | 82-1750-2    | 0190446717966 | 40 - 43 cm                | 28 - 31 cm                | 2 = S    |
|                 | 82-1750-3    | 0190446717973 | 43 - 46 cm                | 31 - 34 cm                | 3 = M    |
|                 | 82-1750-4    | 0190446717980 | 46 - 49 cm                | 34 - 37 cm                | 4 = L    |
|                 | 82-1750-5    | 0190446717997 | 49 - 52 cm                | 37 - 40 cm                | 5 = XL   |
|                 | 82-1750-6    | 0190446718031 | 52 - 55 cm                | 40 - 43 cm                | 6 = XXL  |
|                 | 82-1750-7    | 0190446718048 | 55 - 58 cm                | 43 - 46 cm                | 7 = XXXL |
| GenuForce® Plus | 82-1751-5    | 0190446716952 | 52 - 55 cm                | 37 - 40 cm                | 5+       |
|                 | 82-1751-6    | 0190446718055 | 55 - 58 cm                | 40 - 43 cm                | 6+       |
|                 | 82-1751-7    | 0190446718062 | 58 - 62 cm                | 43 - 46 cm                | 7+       |
|                 | 82-1751-8    | 0190446718079 | 62 - 65 cm                | 46 - 49 cm                | 8+       |

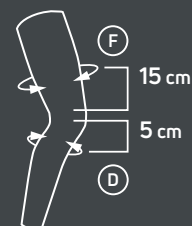

### Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE


Prendre la mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

### Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET

Prendre la mesure 15 cm au-dessous du milieu de la rotule

## GENUFORCE® XPERT

| CODE ARTICLE | CODE GTIN     | Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE | Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET | TAILLE   |
|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 82-1753-1    | 0190446716976 | 37 - 40 cm                | 25 - 28 cm                | 1 = XS   |
| 82-1753-2    | 0190446718147 | 40 - 43 cm                | 28 - 31 cm                | 2 = S    |
| 82-1753-3    | 0190446718154 | 43 - 46 cm                | 31 - 34 cm                | 3 = M    |
| 82-1753-4    | 0190446718161 | 46 - 49 cm                | 34 - 37 cm                | 4 = L    |
| 82-1753-5    | 0190446718178 | 49 - 52 cm                | 37 - 40 cm                | 5 = XL   |
| 82-1753-6    | 0190446718185 | 52 - 55 cm                | 40 - 43 cm                | 6 = XXL  |
| 82-1753-7    | 0190446718192 | 55 - 58 cm                | 43 - 46 cm                | 7 = XXXL |

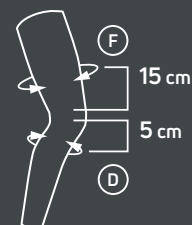

### Ⓕ CIRCONFÉRENCE DE CUISSE

Prendre la mesure 15 cm au-dessus du milieu de la rotule

### Ⓖ CIRCONFÉRENCE DE MOLLET

Prendre la mesure 15 cm au-dessous du milieu de la rotule

## MALLEOFORCE®

| CODE ARTICLE | CODE GTIN     | CIRCONFÉRENCE DE CHEVILLE | TAILLE  |
|--------------|---------------|---------------------------|---------|
| 82-1754-1    | 0190446716983 | 17 - 19 cm                | 1 = XS  |
| 82-1754-2    | 0190446718208 | 19 - 21 cm                | 2 = S   |
| 82-1754-3    | 0190446718215 | 21 - 23 cm                | 3 = M   |
| 82-1754-4    | 0190446718222 | 23 - 25 cm                | 4 = L   |
| 82-1754-5    | 0190446718239 | 25 - 27 cm                | 5 = XL  |
| 82-1754-6    | 0190446718246 | 27 - 29 cm                | 6 = XXL |



## MALLEOFORCE® PLUS

| CODE ARTICLE | CODE GTIN     | CIRCONFÉRENCE DE CHEVILLE | TAILLE  |
|--------------|---------------|---------------------------|---------|
| 82-1755-1    | 0190446716990 | 17 - 19 cm                | 1 = XS  |
| 82-1755-2    | 0190446718253 | 19 - 21 cm                | 2 = S   |
| 82-1755-3    | 0190446718260 | 21 - 23 cm                | 3 = M   |
| 82-1755-4    | 0190446718277 | 23 - 25 cm                | 4 = L   |
| 82-1755-5    | 0190446718284 | 25 - 27 cm                | 5 = XL  |
| 82-1755-6    | 0190446718291 | 27 - 29 cm                | 6 = XXL |



**MANUFORCE®**

| CODE ARTICLE       |               | CIRCONFÉRENCE DE POIGNET | TAILLE  |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------|
| TAILLE             | CODE GTIN     |                          |         |
| 82-1757-1 (Droite) | 0190446717010 | 13 - 14,5 cm             | 1 = XS  |
| 82-1757-2 (Droite) | 0190446718352 | 14,5 - 16 cm             | 2 = S   |
| 82-1757-3 (Droite) | 0190446718369 | 16 - 17,5 cm             | 3 = M   |
| 82-1757-4 (Droite) | 0190446718376 | 17,5 - 19 cm             | 4 = L   |
| 82-1757-5 (Droite) | 0190446718383 | 19 - 20,5 cm             | 5 = XL  |
| 82-1757-6 (Droite) | 0190446718390 | 20,5 - 22 cm             | 6 = XXL |
| 82-1758-1 (Gauche) | 0190446717027 | 13 - 14,5 cm             | 1 = XS  |
| 82-1758-2 (Gauche) | 0190446718406 | 14,5 - 16 cm             | 2 = S   |
| 82-1758-3 (Gauche) | 0190446718413 | 16 - 17,5 cm             | 3 = M   |
| 82-1758-4 (Gauche) | 0190446718420 | 17,5 - 19 cm             | 4 = L   |
| 82-1758-5 (Gauche) | 0190446718437 | 19 - 20,5 cm             | 5 = XL  |
| 82-1758-6 (Gauche) | 0190446718444 | 20,5 - 22 cm             | 6 = XXL |

**EPIFORCE®**

| CODE ARTICLE | CODE GTIN     | CIRCONFÉRENCE DE COUDE | TAILLE  |
|--------------|---------------|------------------------|---------|
| 82-1759-1    | 0190446717034 | 19 - 22 cm             | 1 = XS  |
| 82-1759-2    | 0190446718451 | 22 - 25 cm             | 2 = S   |
| 82-1759-3    | 0190446718468 | 25 - 28 cm             | 3 = M   |
| 82-1759-4    | 0190446718475 | 28 - 31 cm             | 4 = L   |
| 82-1759-5    | 0190446718482 | 31 - 34 cm             | 5 = XL  |
| 82-1759-6    | 0190446718499 | 34 - 37 cm             | 6 = XXL |



**DONJOY®** FORCE RANGE  
Restez actif dans votre quotidien !



*Creating Better Together™*

Enovis™ - DJO Benelux BVBA  
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | Belgique  
**enovis.be**



© Enovis™ - DJO BeNeLux - MKGBNLBV77 - Rev A - 04/2023 - Les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe I. Lire attentivement les notices avant utilisation. Fabricant : DJO, LLC.  
\* Créer Mieux Ensemble.